

Perky

Bubble Bath Massager

バブル バス マッサージャー パーキー




温浴器

取扱説明書

禁転載

あてたいところに自由自在。
バスタブの空間が、
思うままに広がります。

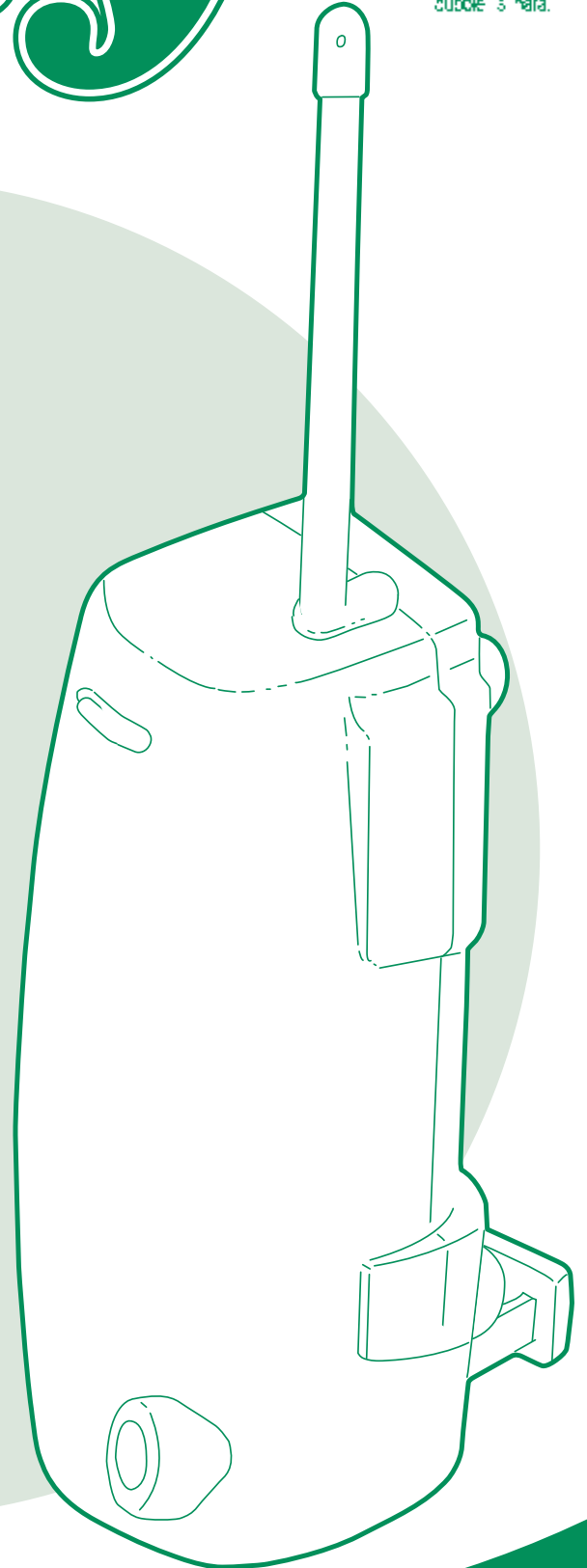

hara hara health ind. co., ltd.

MADE IN JAPAN

ごあいさつ

この度は「バブル バス マッサージャー・パーキー温浴器」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

当温浴器は「ご家庭のお風呂をとびきりのいやし空間に…」を目的に、手軽に温泉気分を味わい「気泡浴効果」で心身ともにリラックスしていただき「気泡浴の3大効果」によって美と健康をお届けするべく開発された製品です。

浴槽のタイプを問わずに取り付けられる超小型の本体から噴き出す、心地よいお湯と泡のマッサージが、1日の疲れやストレスからご家族を解放いたします。当温浴器を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。またお読みになられた後は、必要に応じていつでも読めるように、保証書とともにお手元に大切に保管していただきますようお願い申し上げます。


※ 本器は安全にご使用いただくため、交流100V電源から安全な直流12Vに減電圧いたしておりますので、取扱説明書の内容に従って、ご安心してご使用ください。

目次

本体と付属品	01
製品の特長	02
気泡浴の3大効果	03
各部の名称	04
本体内部機能の特長	05
ご使用の前に1/安全にご使用いただくために	06
故障・不具合について	07
ご確認事項1	08
ご確認事項2	10
ご使用の前に2	12
ご使用方法	14
お手入れ方法・点検	16
アフターサービス	17

本体と付属品

「バブルバス マッサージャー・パーキー」
をご使用前に、梱包ケース内に次の物が
入っていることをご確認ください。

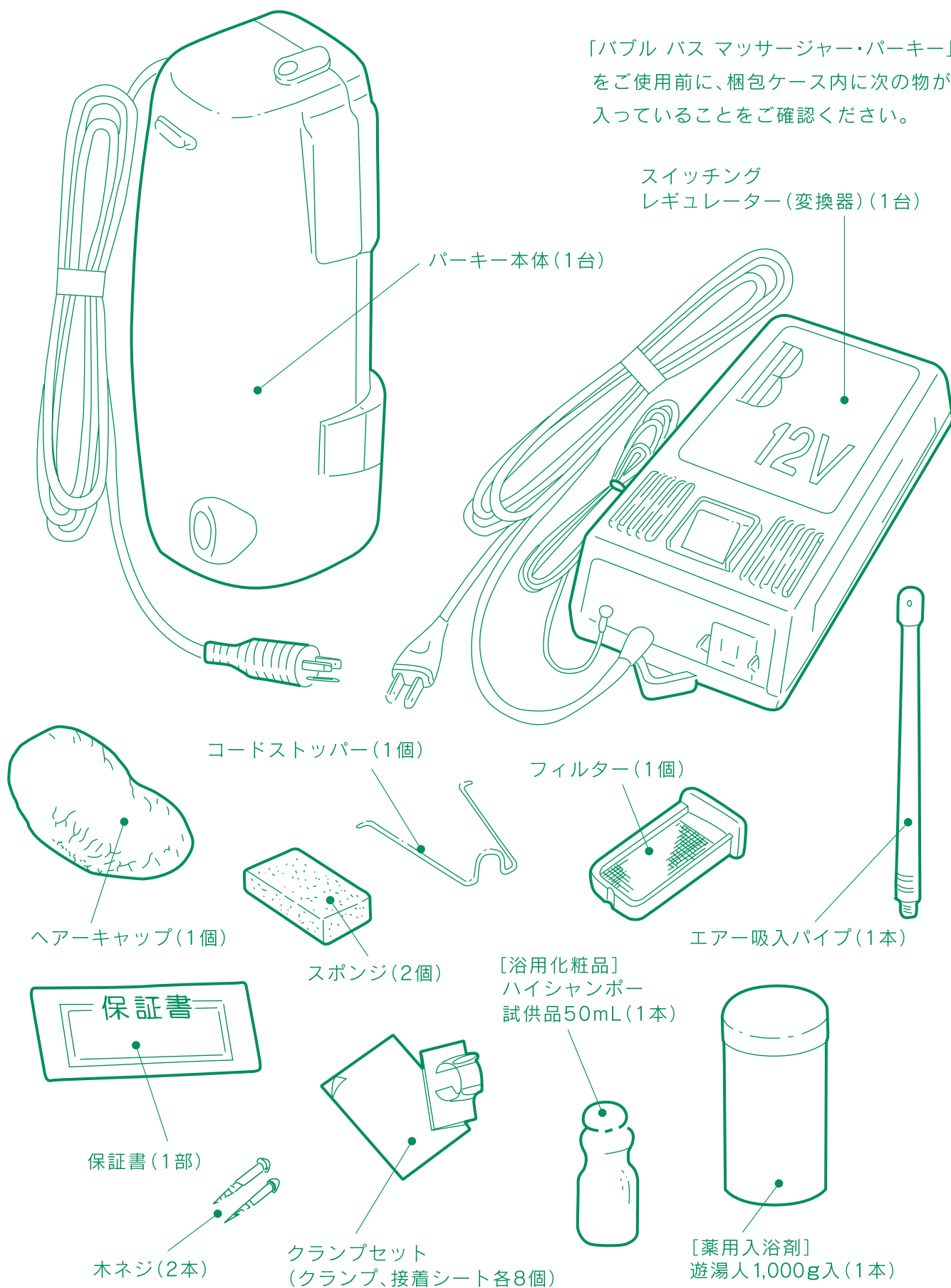

操作は簡単 ワンタッチ

スイッチを押すだけで、簡単にハイパワージェット噴流をお楽しみいただけます。

本体はもちろん 安全設計

本体内部に空運転防止機能、過電流防止機能のIC回路を内蔵し、浴湯外での作動または作動中に問題が生じた場合には、自動的に作動が停止します。


片手でもてる コンパクト設計

全体のフォルムが手にジャストフィットするよう設計されています。重量はわずか2.5kgと、お湯の中へ入れると、片手でらくにもつことができ、噴流の方向は自由自在です。

本体は吸盤により 浴槽内へ自由に 固定できます

本体裏面の3個の吸盤で浴槽内壁へ自由に固定可能で、^{*}背中など手の届かない部分へも簡単に噴流を当てることができます。

^{*}タイルや木製の浴槽では吸盤は使用できません。

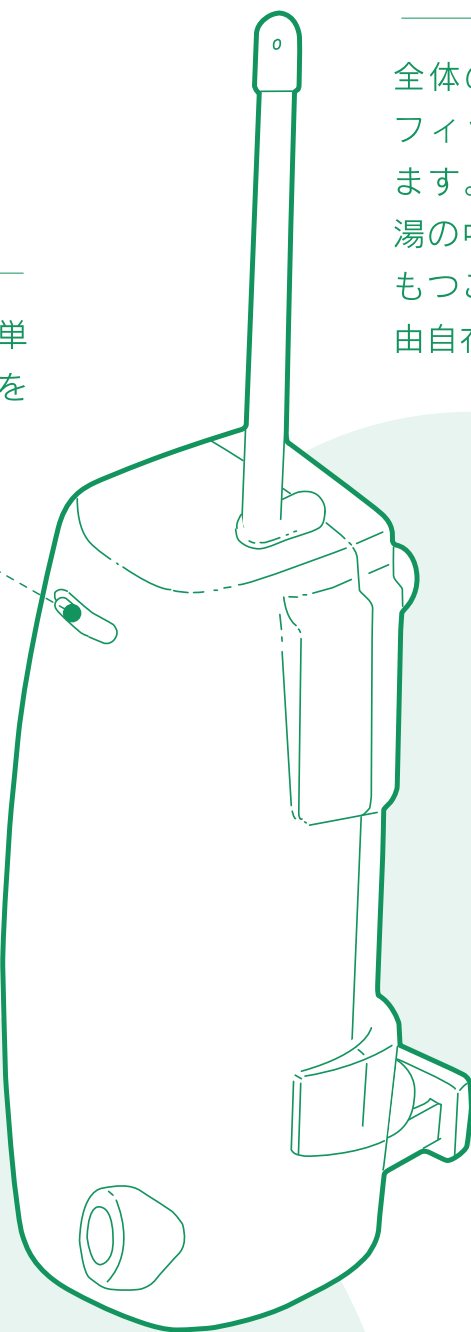

気泡浴の3大効果

身体の表面が美しくなる、 洗浄効果

洗浄効果とは、アカや毛穴に詰まった汚れまでも乳化細分化し洗浄する効果のこと。

ツヤのある美肌作りに大いに役立ちます。

身体の芯まで温まる、 温熱効果

温熱効果とは、気泡浴によって血流が盛んになり、身体の芯まで温まる効果のこと。


疲労回復に役立つと同時に胃腸の働きを良くし、湯冷めのない爽やかな浴後感が実感できます。

身体がイキイキする、 マッサージ効果

マッサージ効果とは、気泡浴によって人体各組織に刺激を与える効果のこと。

筋肉のコリをほぐし、神経痛の痛みを緩和します。

各部の名称

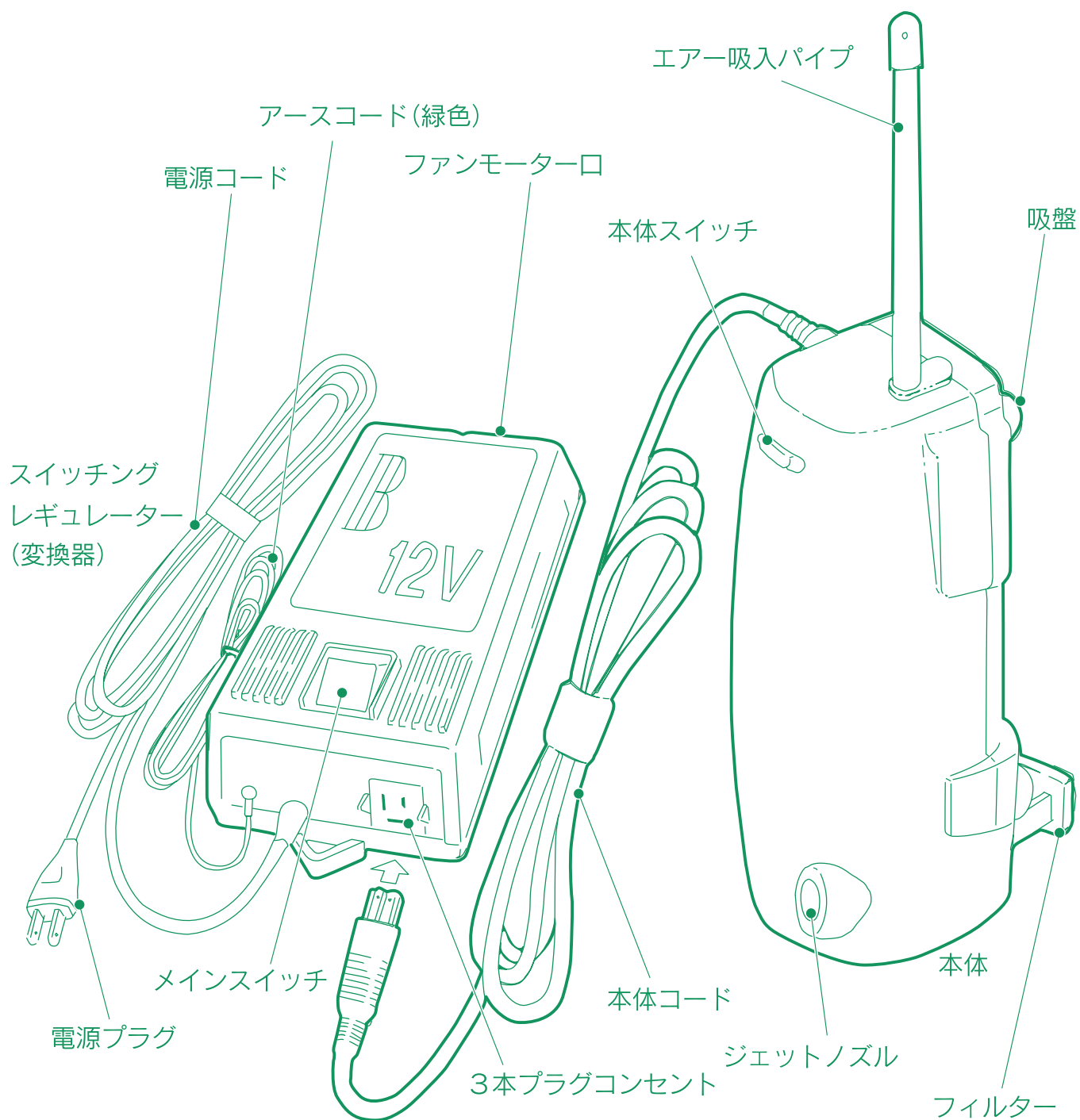

管理医療機器(承認番号:20200BZZ00943000)

[スイッチングレギュレーター] (変換器)

本体規格

最大寸法: 478(H)mm×105(W)mm×92(D)mm

消費電力:108W作動時

材質:ABS樹脂

重量:2.5kg

電源コード(二次側12V)5m



JET
原ヘルス工業株式会社

定格電圧:AC100V

定格消費電力:108W

定格周波数:50/60Hz

定格出力電圧:DC12V

定格出力電流:8A

本体内部機能の特長

空運転防止機能

本体を湯面上などの、適切な吸水ができない状態にて作動させますと、ポンプに負担がかかるため、本体内のIC回路が自動的に作動し、本体を停止させます。

※再び本体を浴湯内に入れ、スイッチを押すと作動します。


過電流防止機能

本体の作動中に何らかの問題が生じ、電流値が変わった場合に本体内のIC回路が、自動的に作動し、本体を停止させます。

※何度も止まる場合は販売店・製造販売元にお問い合わせください。

タイマー機能

本機は連続30分タイマーがついていて、自動的にOFFになります。
再度、使用する場合は、再びスイッチをONにしてください。

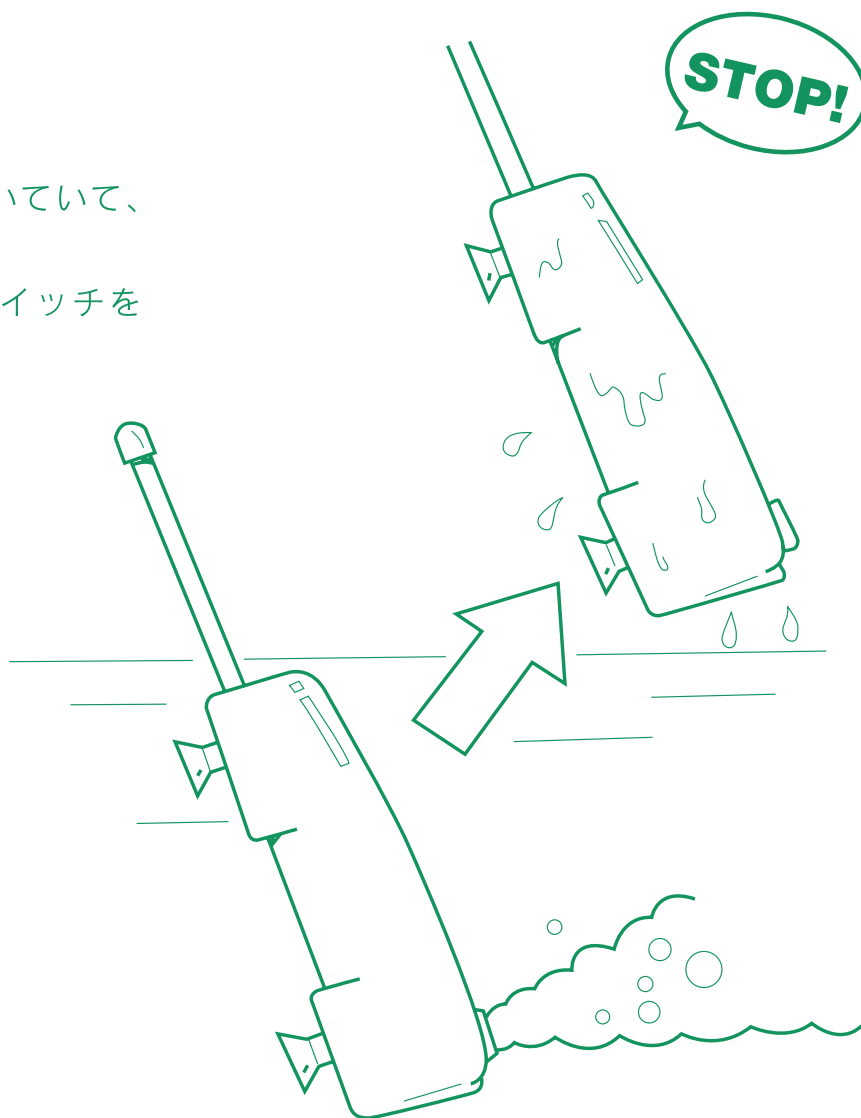

ご使用前に ①

- 医師から入浴を禁じられている方、妊産婦は使用しないでください。
以下の方はご使用前に医師に相談してください。

悪性腫瘍のある方。臓疾患のある方。出血のおそれがある方。妊娠初期の不安定期または出産直後の方。糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方。安静を必要とする方。体温38℃以上(発熱時)。倦怠感・悪寒のある方。血圧の安定しない方。体力に不安のある方。脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどのけがをしている方。疼痛のある方。

- ご使用中、身体に異常を感じた時には、直ちに使用を中止してください。
- 機器に指定された場所以外では使用しないでください。
- ほかの治療器具と同時に使用しないでください。


安全にご使用いただくために

ご使用上の注意

- 浴槽専用です。「気泡浴」以外の目的には、使用しないでください。
- 1回の使用時間は15分程度まで。長時間の使用はおやめください。
- お湯が50℃を超えた時は作動させないでください。
- 付属品は規定されたもの、または指定されたものをご使用ください。
- コードの取りはずしの際は、コードの接続部に無理な力をかけないようにご注意ください。
- 電源プラグ及び本体コードプラグは水をかけたり、濡れた手で触らないようにしてください。
- すべてのコードは、容易に離脱しないように正しく接続してください。

スイッチングレギュレーター(変換器)


- 上に物を乗せないでください。
- 水などをかけないようにご注意ください。
- 湿気の多いところに置くのは避けてください。
- ファンモーター口をふさがないでください。
- 濡れた手で、メインスイッチを操作しないでください。
- 必ず浴室外に設置し、濡らさないようご注意ください。

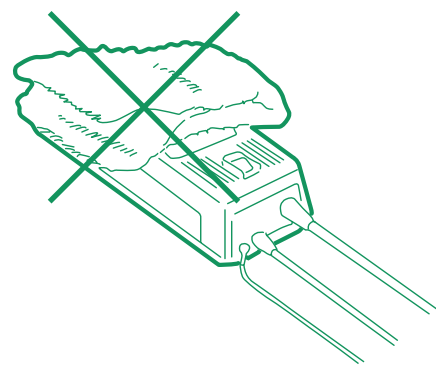

本体

- 本体を落下させたり、ぶついたりしないでください。

- 吸気パイプを把手がわりにしないでください。
- 本体は浴槽の水が沸いてから設置してください。本体を水槽内に設置または入れたままお風呂を沸かさないでください。
- 本体作動中は噴射口を手やタオルなどでふさがないでください。
- 操作つまみ、ダイヤル、スイッチなどを元の位置に戻した後に、電源をお切りください。
- ご使用後は、本体スイッチをOFFにしてから、変換器の電源をOFFにして、必ず浴槽から取りはずしてください。
- 本体の附属品などは、次回の使用に支障のないように清潔にし、湿気の少ないところに保管してください。

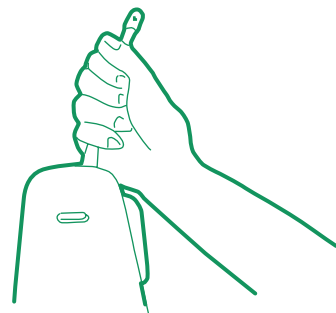

保管・メンテナンス

- フィルターが詰まると噴流が弱くなったり、作動停止する場合がありますので、定期的にお手入れをお願いします。
- 本体の清掃は、シンナー、ベンジン、アルコール、化学雑巾、ナイロンたわしなどを使用しないでください。
- 消耗品、残留物、ならびに機器、付属品を廃棄する際の注意点、またその方法は、各地方自治体の決まりに従って廃棄してください。



故障・不具合について

こんな時は

- 操作つまみ、ダイヤル、スイッチ、タイマーなどが正常に動作しない場合は、ご使用を中止してください。
- 停電の時は、直ちに電源を切り、操作つまみ、ダイヤル、スイッチなどを元の位置に戻してください。
- しばらく使用しなかった後は、使用前に操作つまみ、ダイヤル、スイッチ、タイマーなどが正常に動作するかご確認ください。

故障した時は

- 機器に故障が発見された場合は、直ちに使用を中止し、電源をお切りください。
- 故障した時はご自分で修理なさらずに、お買い上げの販売店または製造販売元にご相談ください。

(注)

本体及び電源コードは改造したりほかの機器で使用しないでください。万が一、改造により故障・事故などが発生しても当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

ご確認事項 ① (本体ご使用前に必ず行ってください)

スイッチングレギュレーター(変換器)の設置


(スイッチングレギュレーターは必ず安定した水のかからない場所を選んで設置してください)

確認作業

01

必ず浴室外の水のかからない場所へ設置してください。

スイッチングレギュレーター(変換器)は防水ではありませんので湿気の少ない場所を選んで設置してください。

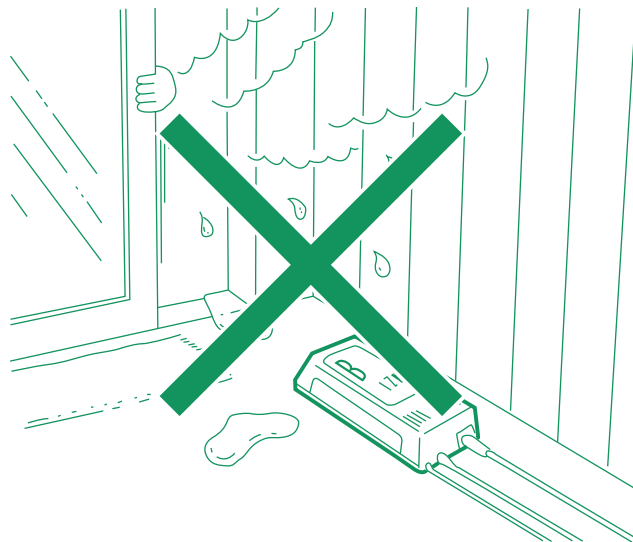


確認作業

02

当社のスイッチングレギュレーター(変換器)内部には回路放熱のためファンモーターが組み込まれていますので、ファンモーター口の周囲は、必ず10cm以上開けてください。

10cm以上間をあけないと放熱効果が得られず故障の原因となります。

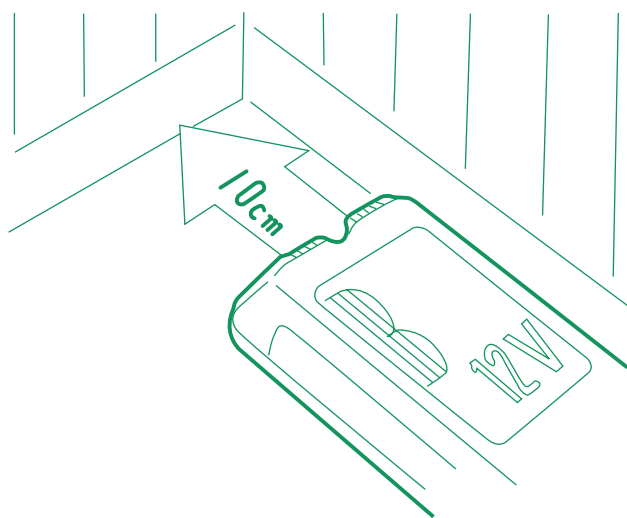


確認作業

03

アースを接続してください。

スイッチングレギュレーター(変換器)のアースコードを家庭用アース端子へ接続してください。


アース端子のない場合には地面とつながっている金属(水道管など)へ接続してください。

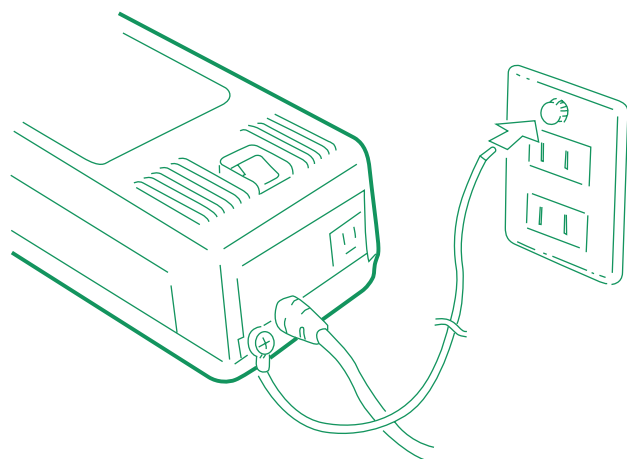

(注) ガス管へは絶対につながないでください。

確認作業

04

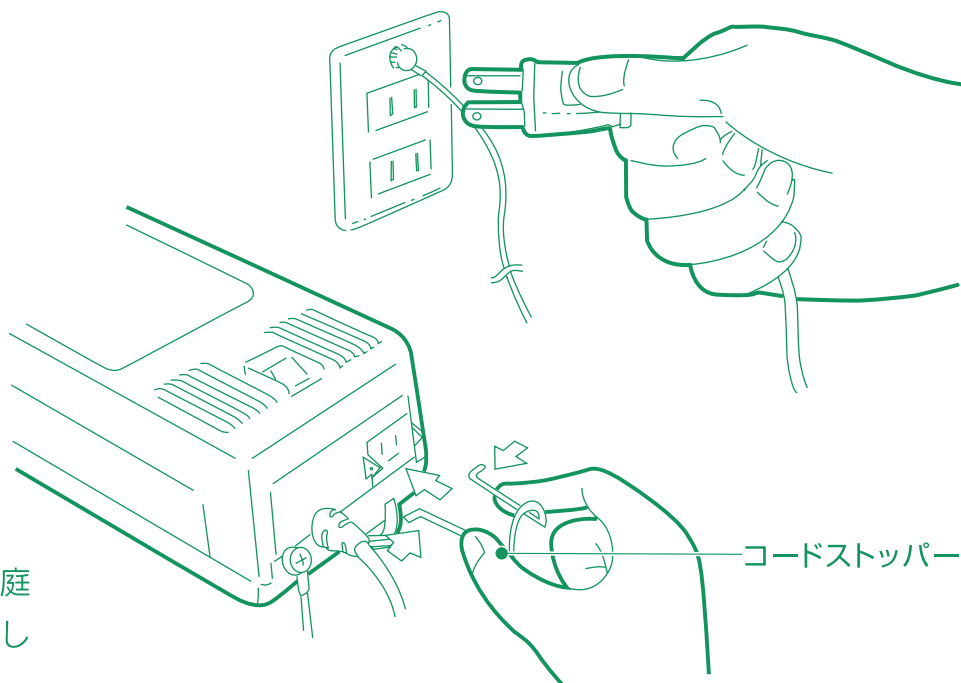


電源プラグを浴室外の家庭用100Vコンセントに差し込んでください。
付属のコードストッパーを取り付けてください。


コードストッパー

確認作業

05

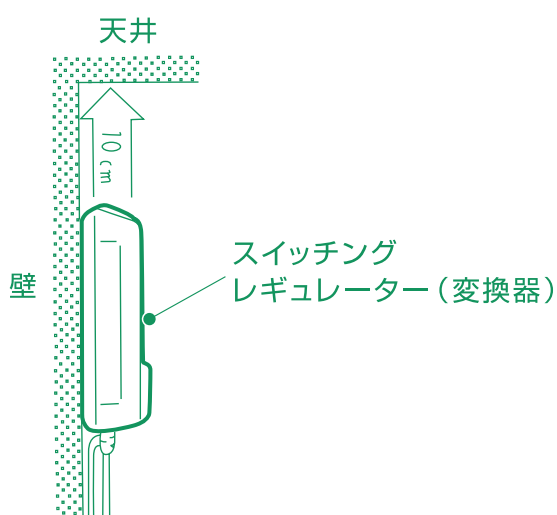

壁へ取り付ける場合は、付属品の取り付け用木ネジをご利用ください。
しっかりとした壁か柱にファンモーター口を上にして、確実に取り付けてください。

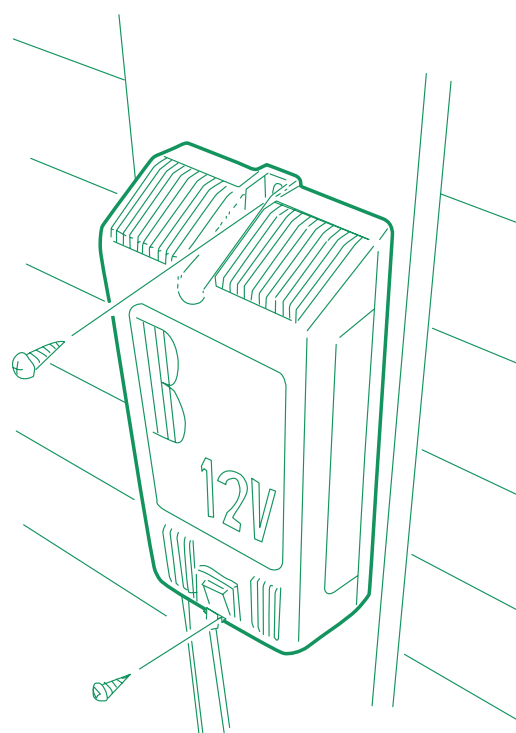

(注) ファンモーター口の周囲10cm以内には、障害物がないように設置してください。


ご確認事項② (本体ご使用前に必ず行ってください)

本体コードプラグの接続

作業手順

01


本体コードプラグをスイッチングレギュレーター(変換器)の3本コンセントへ接続してください。(最後までしっかり差し込みます)

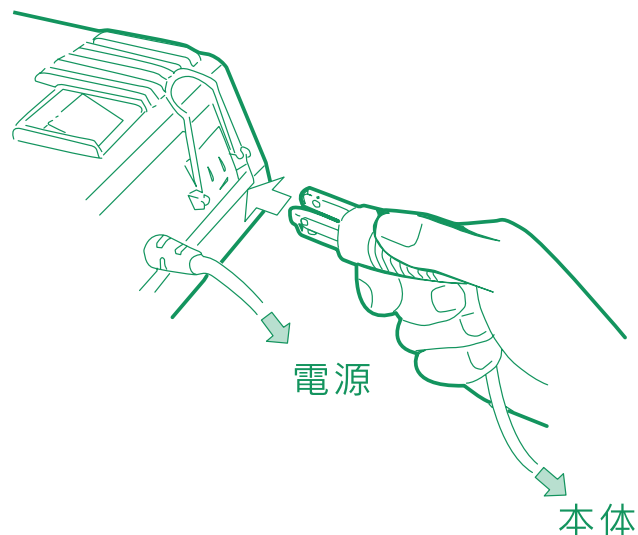

作業手順

02

コードストッパーをお掛けください。

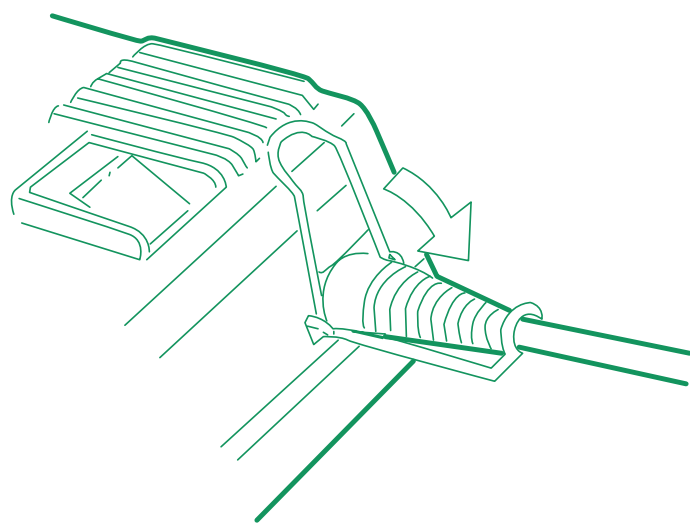

作業手順

03


束ねてある本体コードをのばしてください。

(注) 束ねたままで本体を使用するとコードが熱をもつことがありますのでお避けください。

本体への付属品の取り付け

作業手順

01

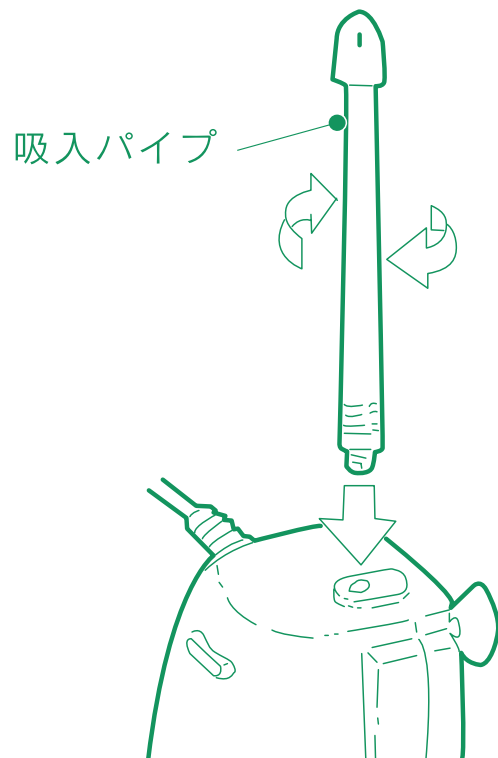


吸入パイプの取り付け。

本体上部の接続口にエアー吸入パイプを時計方向へまわし取り付けます。

(注)エアー吸入パイプのネジ込みが不十分ですと、空気が十分に吸い込まれません。

作業手順

02

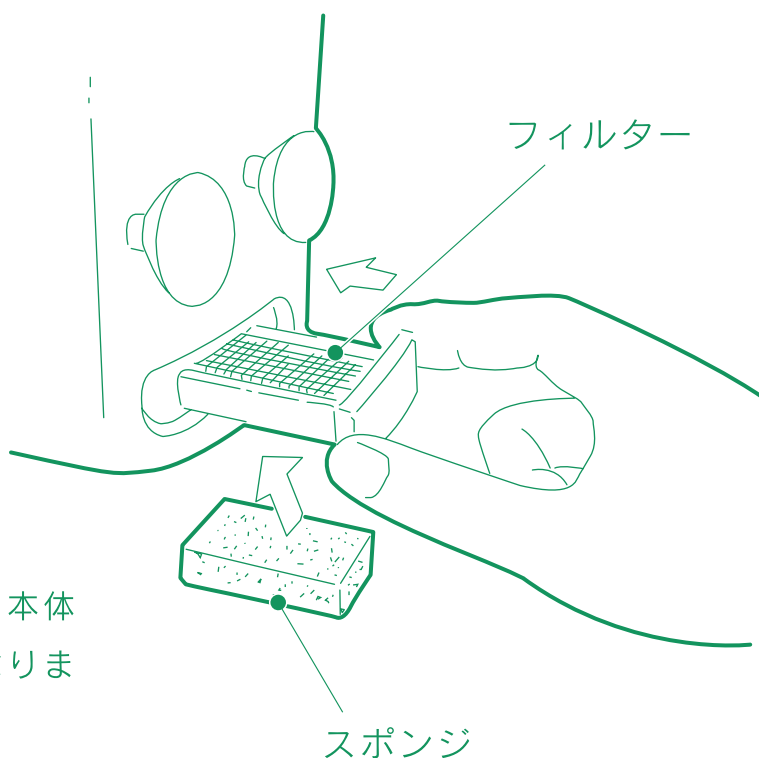

フィルター・スポンジの取り付け。

フィルター・スポンジを取り付けないと本体内部に直接ゴミが入り、故障の原因となりますので必ず取り付けてください。

ご使用前に ② (本体ご使用前に必ず行ってください)

本体コードの固定


(本体コードが長すぎた場合は、付属のクランプセットで浴室の壁面へ固定することが可能です)

作業手順

01

適切な固定位置を決めます。

固定位置をきれいに拭いてください。
(汚れ、水分など)

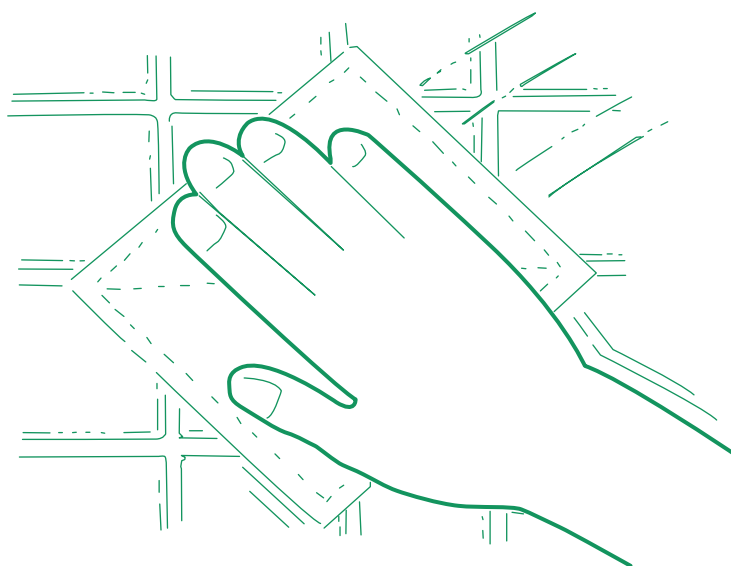


作業手順

02

接着シートを貼ってください。

まずクランプ用接着シート(透明シール)を空気が入らないように、配線する位置へ等間隔に貼ります。

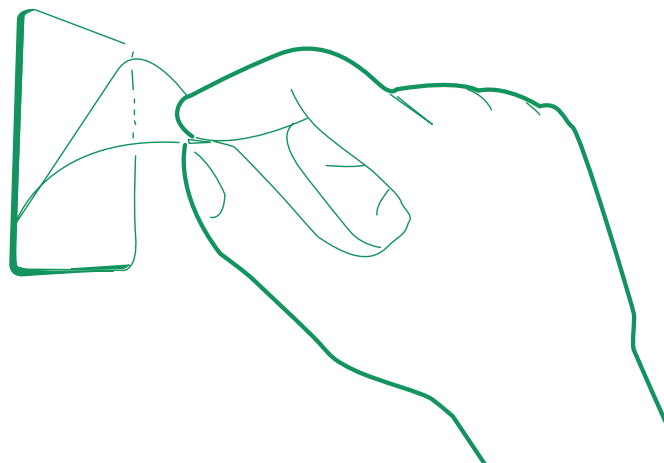


作業手順

03

クランプを固定します。

クランプ裏面のシールをはがし、開口部が上になるように接着シートへ貼ってください。

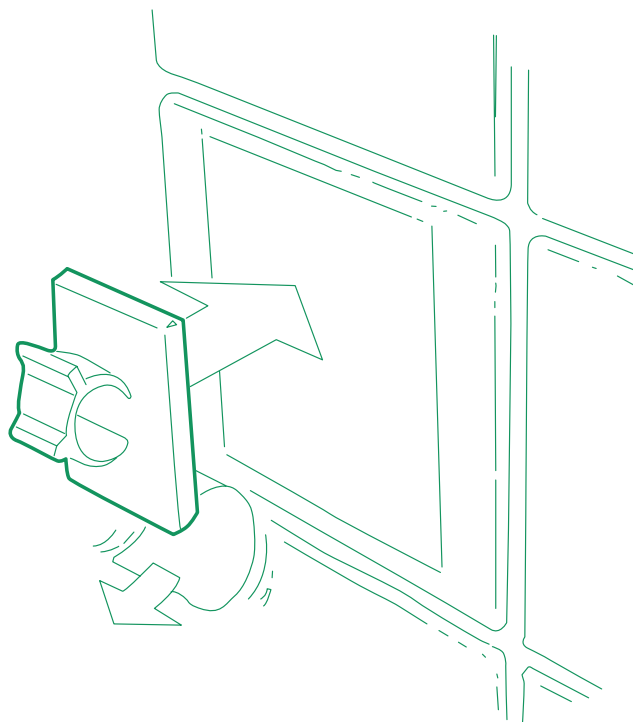


作業手順

04

本体コードを固定します。

本体コードのまがりを直しながらクランプへセットします。次に「カチッ」と音がするまで矢印の方向へ押し込み固定します。

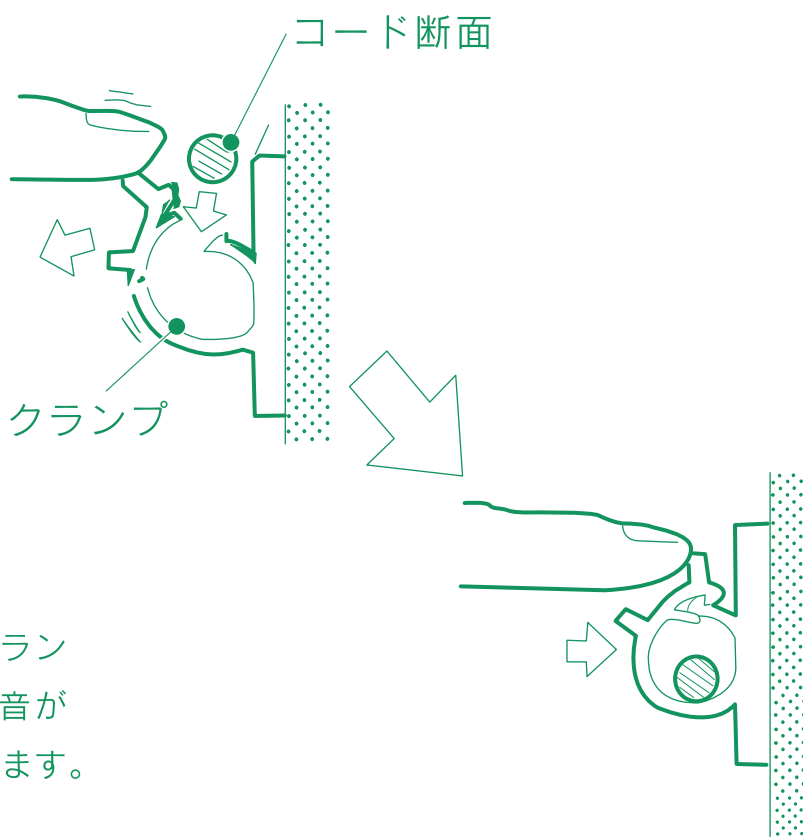

ご使用方法

本体のご使用方法


作業手順

01

スイッチングレギュレーター(変換器)のメインスイッチをONにします。

メインスイッチをONにすると、スイッチのランプが点灯し、内部のファンモーターの始動音がします。

(注)使用後は、必ずスイッチをOFFにしてください。

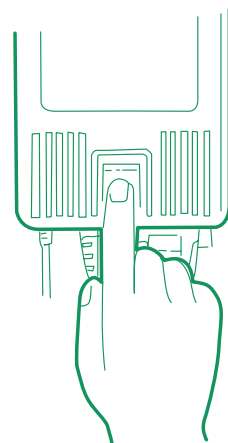


作業手順

02

本体を吸盤で※浴槽内へ固定します。

(注)この時エア吸入パイプ先端が湯面上にあることをご確認ください。

※タイルや木製の浴槽では吸盤は使用できません。

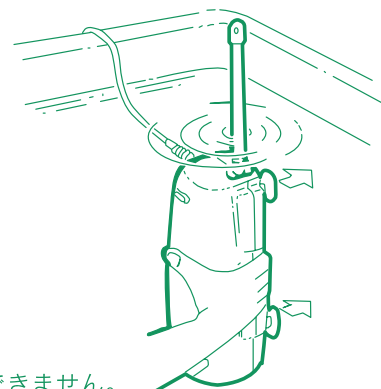


作業手順

03

本体上部のスイッチを押し作動を開始させます。

本体スイッチをONにするとジェットノズルから気泡がハイパワー噴射され、浴槽内へ微粒の泡が広がります。

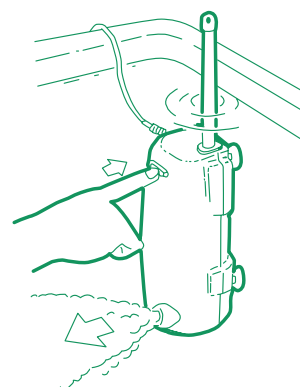

作業手順

04

ご使用後本体スイッチをもう一度押すと作動停止します。

お湯からあがる時は、必ずスイッチをOFFにして作動が停止したことをご確認ください。

安全機能

本体を水中より取り出し、下部吸水口よりの湯・水の吸入が停止された場合、自動的に作動が停止する安全機能を備えています。(P.5参照)

手にもってのご使用方法

本体後部をしっかりつかみます。
好きなところへ自由にハイパワー噴射が
当てられます。


なお、体に直接当てられる場合、身体とノズルは3cm以上離してご使用ください。ノズルをふさぐとエア吸入口より浴湯が逆流しますのでご注意ください。
(性能には影響はありません)



バブルバス マッサージャーによるご入浴方法

次にあげる入浴方法が理想的ですが、お客様ご自身の体調、習慣、
環境に合わせ無理のないようご使用ください。

- ご入浴温度は38℃～40℃前後(少しぬるめの温度)
- 1回のご入浴時間は体調にもよりますが、目安として20分～30分
くらいをお勧めします。
- 1日のご入浴回数は朝と夜の2回が理想的です。
- 薬用入浴剤「遊湯人」をご使用いただきますと、17の効能を発揮し、
1日の疲れをいやします。
- 浴用化粧品ハイシャンプーを数滴投入していただきますと、
さらに発泡状態を豊かにし浴用化粧品として爽快な入浴をお楽しみいただけます。
- 入浴後は発汗が盛んになります。クーラーなどで急激に身体を冷さずに
バスタオル・バスローブなどで身体を包み、完全に汗を出すように心がけましょう。
- 入浴時には、付属のヘアーキャップもご使用ください。

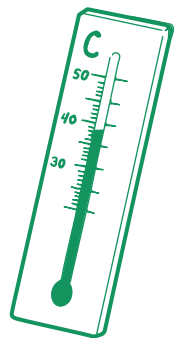


お手入れ方法・点検

(修理をご依頼なされる前に下記の
ことをご確認ください)


本体が汚れたら

- まず本体およびスイッチングレギュレーターともにOFFにします。
- 本体コードプラグを抜いてください。
- 中性洗剤をスポンジなどのやわらかいものに含ませ、丁寧に洗ってください。

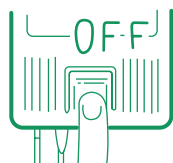


(注)

シンナー、ベンジン、アルコール、化学雑巾、ナイロンたわしなどは使用しないでください。

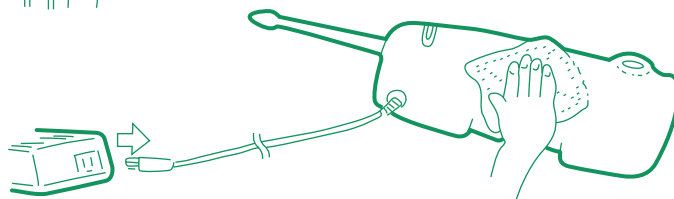

フィルターの掃除

- 本体からフィルターを取りはずしてください。
- フィルターからスポンジをはずしてください。
- ブラシなどを使い流水で汚れを流してください。
- スポンジもよくもみ洗いしてください。

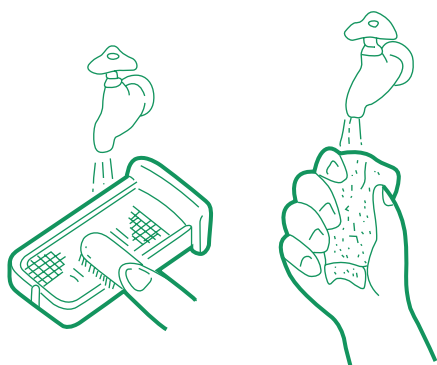

(注)

汚れのひどい場合は、フィルターを交換してください。(P.17 消耗品・別売品 参照) フィルターを取り付けない状態でのご使用は、故障の原因となります。絶対におやめください。

故障かな?と思ったときの対処法

症状	診断	対処法
● 本体のスイッチを入れても作動しない。	● 電源プラグまたは本体コード3本プラグが抜けていませんか。 ● スwitchングレギュレーターのスイッチがOFFになっていませんか。	● プラグをコンセントに差し込んでください。 ● スwitchングレギュレーターのスイッチをONにしてください。
● 噴射が弱い。	● フィルターが詰まっていますか。	● フィルターを取りはずし洗ってください。
● 気泡が出ない。	● 空気口が詰まっていますか。 ● 空気口が水中に入っていないですか。	● 穴の詰まりを取り除いてください。 ● 水面より上に引き上げてください。
● 使用中に停止する。	● 各プラグが抜けていませんか。	● プラグをコンセントに差し込んでください。

☆ 上記の点検をしてもなお不具合の場合は、裏面の製造販売元もしくは販売店までご相談ください。

☆ お客様ご自身での分解や修理は危険ですから絶対にしないでください。(修理をお受けできない場合があります)

アフターサービス

保証書について

保証書は、内容をよくお読みになり、必ず「お買い上げ日・販売店名」をご確認のうえ、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年とします。

修理のご依頼

取扱説明書のご使用方法に従って使用した状態で、保証期間内に故障が生じた場合には、無償で修理させていただきます。保証期間を過ぎている場合は、販売店または製造販売元までご相談ください。保証期間内でも、不当な改造による故障や取扱説明書以外の使用による故障などは、無償修理または有料であっても修理をお受けできないことがあります。

詳しくは、保証書裏面の保証規定をお読みください。

消耗品・別売品

消耗品名	単位	価格 (本体+消費税)
ハイシャンプー 300mL	1本	1,800円+消費税
バスマッサージャーエアパイプ	1本	780円+消費税
バスマッサージャーフィルター	1枚	470円+消費税
バスマッサージャーフィルタースポンジ	2個	185円+消費税
バスマッサージャー吸盤	3個	530円+消費税
バスマッサージャークランプセット	1袋(8個入)	650円+消費税
バスマッサージャーサイレントエアパイプ	1本	3,000円+消費税
薬用入浴剤『遊湯人』(医薬部外品) 1000g	1本	4,800円+消費税



【全国共通】フリーダイヤル  0120-34-1262

原ヘルス工業株式会社

〒135-0031 東京都江東区佐賀1-1-14 TEL.03(5621)1011 FAX.03(5621)1010

バブルスター パーキー 温浴器 承認番号: 第 20200BZZ00943000

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。内容をよく理解して、記載事項をお守りください。表示を無視した誤った取り扱いにより生じる内容を、次のように区分しています。

【警告】死亡や重傷を負う恐れがある内容を示しています。

【注意】けがや財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

【強制】やらなければならないことを表しています。

【禁止】やってはいけないことを表しています。

【警告】(強制)

身体の健康に重大な影響を与える恐れがありますので、医師から入浴を禁じられている方は使用しないでください。また以下の方は、ご使用前に医師に相談してください。

- ・悪性しゅようのある方・心臓に障害のある方・出血のおそれのある方・妊娠初期の不安定期、または出産直後の方
- ・糖尿病等による、高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害がある方・安静を必要とする方・体温38度以上(有熱期)の方(例 急性炎症症状(倦怠感や悪寒、血圧変動など)の強い時期や、身体が衰弱しているときなど)・脊椎の骨折や捻挫、肉離れなどの急性(とう)痛(疼)性)疾患の方

ご使用中、身体に異常を感じた時には、直ちに使用を中止して医師や専門家にご相談ください。また使用しても効果が現れない場合、医師または専門家に相談してください。

- ・お子様のみでの使用は絶対にやめてください。幼児の手の届く環境で使わないでください。事故の恐れがあります。
- ・使用中に浴槽内に潜ることは絶対にやめてください。吸入口に毛髪が吸い込まれ、重大事故になる恐れがあります。
- ・酒気を帯びた方や高齢者、とくに介護を必要とする方の入浴中の使用にはご注意ください。事故の恐れがあります。

【警告】(禁止)

- ・スイッチングレギュレーターを水中に落とした場合は、分解せずに当社「お客様相談室」に修理を依頼してください。
- ・フィルターケースを緩めたり、はずしたままでのご使用は絶対にやめてください。事故の恐れがあります。
- ・運転中は吸込口を絶対に塞がないでください。事故の恐れがあります。

火災や感電、大けがを防ぐために、スイッチングレギュレーターをご使用の際は必ずお守りください。

- ・必ず浴室外に設置してください・アースは専用端子か水道管などの地面に繋がる金属に接続してください・運転中に電源プラグを抜かないでください・電源プラグはコードを引っ張って抜かないでください・延長コードの使用、タコ足配線をしないでください・束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱、加工しないでください・電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください・電源プラグやコンセントに付着したほこりは、定期的に掃除をしてください・停電や異常時(こげくさいなど)には、運転を停止して電源プラグを抜いてください・濡れた手で抜き差しや操作をしないでください・交流 100V 以外の電源で使用しないでください・定格感度電流が 30 mA 以下の漏電遮断器がある場所をご利用ください・スイッチングレギュレーターの上には、モノを置いたり乗せたりしないでください・スイッチングレギュレーターに水をかけたり、濡れた手で操作をしないでください・スイッチングレギュレーターのファンをふさがないでください・スイッチングレギュレーターを、浴室内など湿気のある場所に絶対持ち込まないでください・スイッチングレギュレーターのスイッチは、本体のご利用が終わりましたら、必ず電源を切った状態にしてください。

- ・指定された場所以外で機器を利用しないでください。
- ・他の治療器具と同時に使用しないでください。
- ・故障した場合は、勝手にいじらずに、販売店や製造販売元に連絡してください。
- ・付属品は規定や指定されたものを使用してください。
- ・機器を改造しないでください。
- ・電源コードが破損した場合、コードの交換は、危険を防止するために、製造業者もしくは同等の有資格者に依頼してください。

故障の場合は、お買い上げの販売員・発売元、あるいは当社お客様相談室にご相談ください。

【注意】(強制)

◆ご使用前は —

- ・入浴前に、電源やスイッチが正常に作動するか、ご確認ください。とくに、しばらく使用していなかった場合は、正常に作動するか、充分確認して下さい。
- ・浴湯が 50 度を超える時は本体を作動させないでください。
- ・本体は、浴槽の水が沸いてから設置してください。本体を浴槽内に設置、または入れたままでお湯を沸かさないでください。

【注意】(禁止)


◆ご使用中は —

- ・本体は浴室専用です。「気泡浴」以外の目的には使用しないでください。
- ・本体を落下させたり、ぶつけたりしないでください。
- ・吸込口や吹出口から指や棒などを差し込んだり入れないでください。
- ・1 回の使用時間は 15 分程度まで。長時間の使用は避けてください。
- ・エア吸入パイプを握手代わりにしないでください。

【注意】(強制)

◆ご使用後は —

- ・ご使用後は本体スイッチを OFF に、またスイッチングレギュレーター電源スイッチも OFF にしてから、必ず本体を浴槽から取り外し乾燥した場所に保管してください。
- ・フィルターは浴湯の汚れ具合にもよりますが、3 回に 1 度程度は洗浄してください。
- ・消耗品、残留物など並びに寿命の終わった機器及び付属品の廃棄は地域で定める条例に従って廃棄してください。

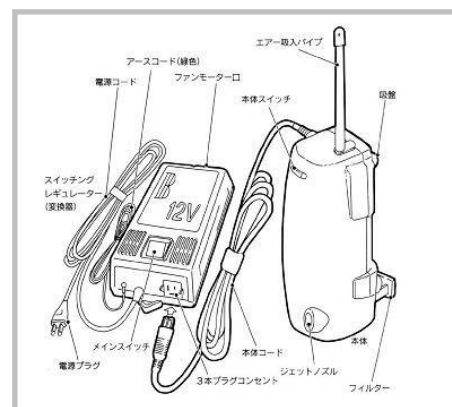

バブルスター パーキー 温浴器

【形状・構造及び原理等】

(1) 構成

- 本体：本体
- 付属品：スイッチングレギュレーター、エア吸入パイプ
- (2) 本体寸法及び重量（エア吸入パイプ含）

○本体寸法：H 478×L 92×W 105 mm ○重量：2.5 kg

(3) 電氣的定格

- 定格電圧：100V ○定格周波数：50/60Hz
- 定格消費電力：108W
- *専用直流電源装置の型番 BSBV-1 A
- *浴室内用/機器を改造しないでください。

(4) 動作原理（家庭用気泡浴装置の場合）

本装置は、特殊ポンプにより湯水を吸い上げ加圧噴射する際に大気中の空気を同時に取り入れ、湯中内に気泡群を噴出させ、一般家庭内で使用し治療する噴出水方式（温水流に空気を混合した気泡群を噴出させる方式）の機器である。*付帯機能：なし

(5) 法令で定められた必要な事項：JIS T 2005:2005

【使用目的、効能、または効果】

温水流や気泡によるマッサージ効果、温熱効果、洗浄効果。
一般家庭で使用すること。

【品目仕様等】

(1) 噴出水方式

- 噴出水量：35.6 l/min ○噴出気泡量：12.6 l/min
- 噴出圧力：32 kPa

(2) 定格時間（タイマー）連続 30分

*タイマー：起動から停止までの連続 30分のタイマーが内蔵されていますが、利用者が自由に時間を設定はできません。

(3) 防水レベル

○本体内部ポンプ部：IPX 5

【操作方法、または使用方法等】

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

(1) 操作方法

- ①本体やスイッチングレギュレーターを正しく設置してください。
- ②電源は家庭用電源 100V、50-60Hz に接続してください。
a. 準備
- ① スwitchングレギュレーターは、必ず浴室外の水や水滴のかからない場所に設置し、アースは専用端子か水道管などの地面に繋がる金属に接続してください。ただし、高温防止のための放熱ファンが内蔵されていますので、天井や壁から 10cm 以上離して設置してください。
- ② 本体にフィルター及びフィルターケースを装着して浴槽内に固定します。その際エア吸入パイプの空気口が浴湯面以上にセットされるよう設置してください。
- ③ スwitchングレギュレーターのプラグを浴室外の家庭用 100V コンセントに差し込んでから、本体コードを延ばし、3 本プラグをスイッチングレギュレーターのコンセントに差込み、付属のコードストッパーを掛けてください。
- ④ スwitchングレギュレーターに接続した本体コードは、付属のクランプセットで必ず固定してください。余ったコードは、浴室外で巻き取ってください。

b. 使用の開始

- ① スwitchングレギュレーターの電源スイッチを ON にする。
 - ② 本体スイッチを ON にすると、ポンプ部が起動します。
- ### c. 使用の終了
- ① 本体スイッチを OFF にします（30 分経過すると自動的に停止します）
 - ② スwitchングレギュレーターの電源スイッチを OFF にします。

(2) 安全装置

- ① 過電流防止機能 ② 空運転防止機能

【使用上の注意】

- (1) 次の人は使用前に医師に相談してください。
a. 悪性しゅよう（腫瘍）のある人 b. 心臓に障害のある人 c. 出血のおそれのある人 d. 妊娠初期の不安定期、または出産直後の人 e. 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 f. 安静を必要とする人 g. 体温 38 度以上（有熱期）の人
例 1. 急性炎症症状 [けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期 例 2. 衰弱しているとき h. せきつい（脊椎）の骨折、捻挫、肉離れなど、急性 [とう（疼）痛性] 疾患の人 i. 医師から入浴を禁じられている人。（JIS T 2005 より）
- (2) 基本的な重要事項
a. 身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
b. 使用しても効果が現れない場合は、医師や専門家に相談してください。
c. 防水設計ではない機器は、水がかからないよう使用してください。
d. 使用環境条件及び使用条件について注意してください。
e. 指定された場所以外では使用しないでください。
(3) 付属品は規定、または指定されたものを使用してください。
(4) 定められた使用時間を超えないでください。
(5) 機器を使用する前は次のことに注意してください。
a. 全てのコードは容易に離脱しないよう正しく確実に接続してください。
b. しばらく使用しなかった機器を使用するときは、スイッチやタイマーなど、機器が正常に、かつ安全に作動することを確認してください。
c. 他の治療器と同時に使用しないでください。
(6) 使用中には、次のことに注意してください。
a. 機器に故障が発見された場合は、使用を直ちに中止して電源を切ってください。
b. 停電の時は直ちに本体スイッチを OFF に、またスイッチングレギュレーターの電源スイッチも必ず切ってください。
(7) 機器の故障及び取扱に際しては、次のことに注意すること。
a. 故障の場合は、お買い上げの販売員・発売元、あるいは当社お客様相談室にご相談ください。
b. 機器は改造しないでください。

【取扱上の注意】

- (1) 取扱いを間違えると不具合を生じることがあるので、使用方法、使用上の注意等を厳守してください。
- (2) 消耗品や残留物、並びに寿命の終わった機器及び付属品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従って廃棄してください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) しばらく使用しなかったときには、使用前に必ず作動（電源が入る、気泡流など）を確認してご使用ください。
- (2) 本体が汚れていたら、中性洗剤をスポンジなど、柔らかなものに染み込ませて拭いてください。シンナー、ベンジン等の溶剤を使用しないでください。
- (3) 故障の場合は、お買い上げの販売員・発売元、あるいは当社お客様相談室にご相談ください。
- (4) 機器は改造しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名、または名称及び住所等】

〈製造販売元〉

原ヘルス工業 株式会社
東京都江東区佐賀 1-1-14 ハリバ-サドビル
TEL：03-5621-1011

〈製造元〉

原ヘルス工業 株式会社 本社工場

〈製品に関するお問い合わせ・ご相談〉

原ヘルス工業 株式会社
お客様相談室 フリーコール：0120-341-262